

*CUIDADOS A SEGUIR  
PARA PIEZAS DE MANO  
Y CONTRANGULOS.*

**Roentgen**®

**Show Room México**

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



**US Corporate Offices**

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



[www.tudepositodental.com](http://www.tudepositodental.com)



[deposito.dental.roentgen](https://facebook.com/deposito.dental.roentgen)



[ventas@tudepositodental.com](mailto:ventas@tudepositodental.com)



55 3269 8800

# Roentgen®

## Precauciones:

- ✓ La seguridad del paciente es lo más importante.
- ✓ Solo para uso profesional.
- ✓ No haga un uso incorrecto de la pieza de mano.
- ✓ No desensamble, no altere la pieza de mano.
- ✓ Verifique la vibración, el ruido y el sobrecalentamiento fuera de la cavidad bucal del paciente antes de su uso.
- ✓ Si se detecta alguna anomalía durante el uso, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor.
- ✓ Después de un uso prolongado, el mango puede volverse ruidoso.
- ✓ Sustituya el cartucho por uno nuevo fabricado por el distribuidor. La no sustitución del cartucho puede causar accidentes o perjudicar la audición del operador.
- ✓ Si presiona el botón de encendido mientras la fresa está girando, hará que se sobrecaliente el cabezal del mango.
- ✓ Se debe tener especial cuidado durante el uso para mantener el tejido de la mejilla alejado del botón de encendido de la pieza de mano.
- ✓ El contacto con el tejido de la mejilla puede hacer que el algodón de empuje se desprenda y se produzcan lesiones en el paciente.
- ✓ No deje caer, golpee ni someta a golpes excesivos.
- ✓ No utilice fresas dobladas, dañadas o de calidad inferior.
- ✓ El vástago podría doblarse o romperse incluso con la velocidad recomendada.
- ✓ Mantenga siempre limpia la pieza de mano.
- ✓ La entrada de residuos en el porta-fresas podría provocar la salida de la fresa y que esta no se montara en el interior del porta-fresas.
- ✓ No supere la velocidad recomendada por el fabricante de la fresa.
- ✓ No utilice la pieza de mano sin la fresa o la fresa de prueba.
- ✓ Monte siempre la fresa o la fresa de prueba, incluso cuando la pieza de mano no esté en uso.
- ✓ Retire la fresa o la fresa de prueba una vez que el suministro de aire se haya interrumpido por completo.

# Roentgen®

## **Lubricación:**

Aplicar lubricante durante 1-2 segundos en el tubo de aire de impulsión al final de cada jornada de trabajo. En caso de que el uso de la pieza de mano sea superior a la media, lubrique con spray dos veces al día: una a la hora de comer y otra al final de la jornada de trabajo. Asegúrese de lubricar suficientemente con spray antes de esterilizar en autoclave.

En caso de utilizar aceite de turbina (nota de pedido Z016-112), suministrar 2-3 gotas en el tubo de aire de conducción una o dos veces al día.

## **Proceso de lubricación - Contrángulo de endodoncia:**

- ✓ Limpie la superficie externa del contrángulo cuidadosamente con una solución de limpieza o desinfectante.
- ✓ No se recomienda el uso de soluciones con cloro.
- ✓ Lubrique solo la cabeza del contrángulo.
- ✓ Inserte la boquilla del pulverizador en la parte trasera del contrángulo.
- ✓ Coloque la cabeza del contrángulo en la bolsa para esterilización y ciérrela.
- ✓ Posteriormente, colóquela en el autoclave.

# Roentgen®

## **Esterilización:**

Se recomienda la esterilización en autoclave.

Se requiere esterilización en autoclave después de cada paciente, como se indica a continuación:

- ✓ Autoclave.
- ✓ Cepille el exceso de suciedad y limpie con un paño empapado en alcohol.
- ✓ Retire la pieza de mano de la manguera y lubrique con spray como se describe en la sección de lubricación.
- ✓ Introduzca la pieza de mano en una bolsa de esterilización y ciérrela.
- ✓ Autoclave hasta un máximo de 135 °C o 121 °C durante 15 minutos a 132 °C.
- ✓ El elemento calefactor puede estar situado en la parte inferior de la cámara, y la temperatura allí localizada puede superar el valor ajustado. Coloque las piezas de mano en la bandeja central o superior.
- ✓ No esterilice en autoclave la pieza de mano, aunque esté empaquetada, junto con otros instrumentos de los cuales no se limpian suficientemente los químicos. Esto es para evitar decoloración y/o daños al enchapado de la pieza de mano.