


# Preinstalación

Roentgen RTG-397

# Roentgen®

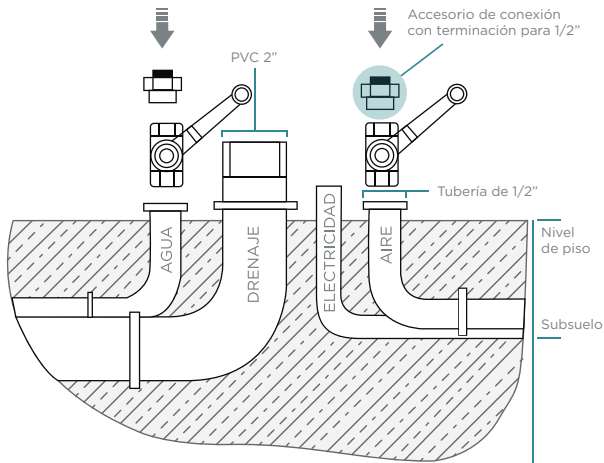

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PISO
<b>Aire</b>	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
<b>Agua</b>	Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
<b>Drenaje</b>	Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%.	5 cm
<b>Contacto Eléctrico</b>	Contacto para clavija de uso rudo / alimentación 127 V.	10 cm
<b>Compresor</b>	Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" <i>Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.</i>	
<b>NOTA</b>	Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto <b>pierde la garantía.</b>	

