


Preinstalación

Roentgen RTG-PANDA

Roentgen®

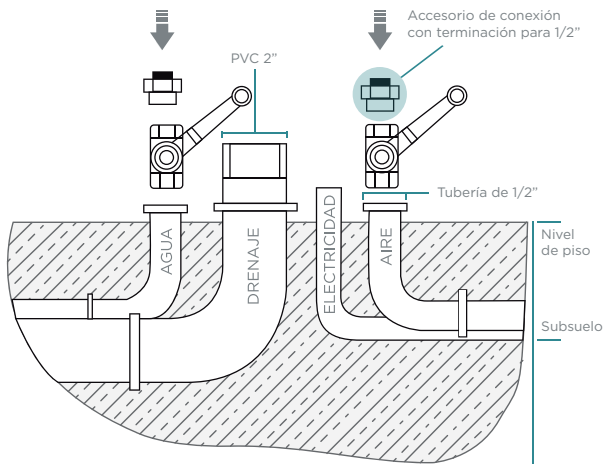

| NOMBRE | ESPECIFICACIÓN | NIVEL DE PISO |
|--------------------|--|---------------|
| Aire | Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso. | 5 cm |
| Agua | Tubo de cobre de 1/2" con terminación rosca interna, se sugiere instalar llave de paso. | 5 cm |
| Drenaje | Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%. | 5 cm |
| Contacto Eléctrico | Contacto para clavija de uso rudo / alimentación 127 V. | 10 cm |
| Compresor | Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" <i>Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.</i> | |
| NOTA | Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto <i>pierde la garantía.</i> | |

