

Roentgen®

Conformador de Acetatos Vacuum

Roentgen

MANUAL DE USUARIO



1.- Conecte la máquina con un voltaje de 110V / 50Hz, verifique el estado del motor de vacío y del dispositivo de calefacción eléctrica.

2.- Gire la cubierta superior 90° (desde el lado izquierdo o derecho), coloque una película entre el marco superior e inferior y gire la perilla para cerrar los marcos firmemente. Gire la cubierta superior de vuelta y presione la llave elevadora para elevar el marco a la posición de trabajo (hay un soporte de posición en los ejes principales).

Luego coloque el producto en el medio de la hoja y encienda el dispositivo de calefacción para calentar la película. Apague el dispositivo de calefacción (después de unos 2-3 minutos), cuando la superficie inferior de la película esté debajo del marco inferior aproximadamente 1 cm. Gire la llave elevadora para bajar el marco y encienda el motor de vacío, retire el producto después de formar la lámina.

A continuación se muestra la estructura de la máquina como referencia.



3.- Uso y método de aplicación de la bola de acero estocástica: retire la caja de aluminio, coloque el modelo a un lado y luego no necesite utilizar la bola de acero para dar forma a la pieza a enterrar, vuelva a colocarla en la estación de radio.

Parte de formación al vacío	Modelo
	Caja de aluminio
	Bola de acero
No necesita dar forma a la parte	Orificio de red