

Tina Ultrasónica Dental

Roentgen RTG-4820

Roentgen®

Manual de Uso



Solicitud

Tienda de anteojos, joyería, relojería, taller de reparaciones, hospital, clínicas dentales, laboratorio, taller electrónico, oficina y uso doméstico.

- POR FAVOR LEA ESTA INTRODUCCIÓN ANTES DE UTILIZAR
- GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO







- 1. Tapa
- 2. Tanque de acero inoxidable
- 3. Alojamiento
- 4. Panel de control
- 5. Máx. marca
- 6. Cable de alimentación
- 7. Cesta de plástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Nombre: Tina Ultrasonica	Fuente de alimentación: <input type="checkbox"/> AC100-120V 60Hz <input type="checkbox"/> DAC200-240V 50Hz
Modelo: Roentgen RTG-4820	Potencia: 70 w
Tamaño total: 290 x 223 x 185 mm	Frecuencia: 40 KHz
Tamaño del tanque: 250 x 150 x 80 mm	Ajuste de tiempo: 0-8 min.
Volumen: 2500 ml	Peso bruto: 2538 +- 10g

DISPONIBLE PARA

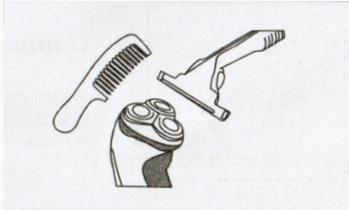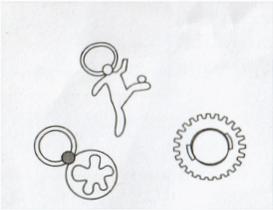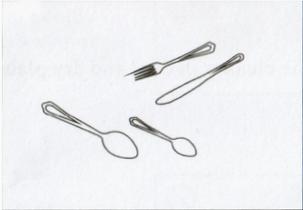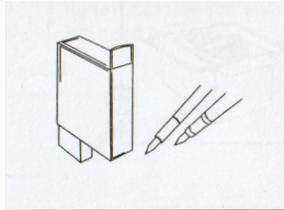
Gafas y reloj	Joyería	Uso diario
		
<p>Gafas, gafas de sol, cadenas de reloj, relojes impermeables, etc.</p>	<p>Collares Anillos, Aretes Pulseras etc.</p>	<p>Cabezales de máquinas de afeitar eléctricas, cuchillas de afeitar, dentaduras postizas, peines, cepillos de dientes, etc.</p>
Artículos Metálicos	Vajilla Metálica	Papelería
		
<p>Piezas de reloj, monedas antiguas, insignias, boquillas de máquina, etc.</p>	<p>Tenedores, cuchillos, cucharas, etc.</p>	<p>Cabezales de pluma, cabezales de impresora, cartuchos de inyección de tinta, sellos, etc.</p>

PROCESO DE ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD MEDIANTE TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDOS


- El efecto de limpieza será mucho mejor si se usa la máquina junto con el solvente adecuado.

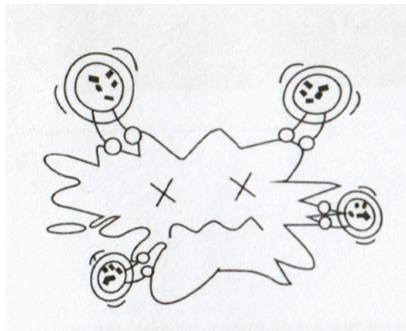

Como onda ultrasónica a través de la solución en el tanque, causa presiones altas y bajas alternas en la solución.

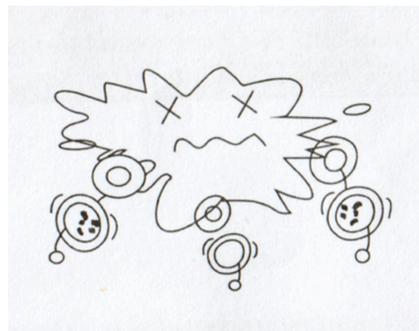


Durante la etapa de baja presión, se forman y crecen millones de burbujas microscópicas. Este proceso se llama "CAVITACIÓN".

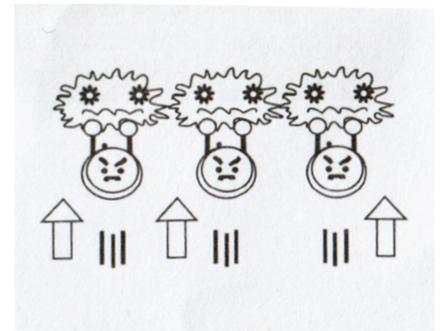


Durante la etapa de alta presión, las burbujas implosionan liberando enormes cantidades de energía. Trabajan en todas las direcciones, atacando la superficie e invadiendo todos los recovecos y aberturas.

CUATRO FORMAS DE LIMPIEZA

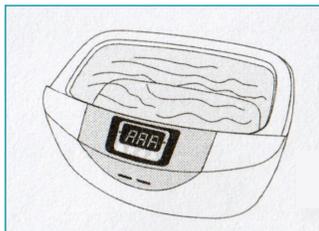


LIMPIEZA GENERAL

Use solo agua del grifo para la limpieza general. El agua debe sumergir el artículo a limpiar, pero sin exceder la marca "MAX".

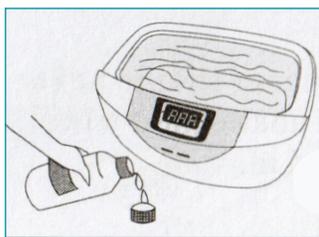


LIMPIEZA MEJORADA

Atención: cuando el artículo esté manchado o extremadamente sucio, agregue alrededor de 25-30 ml de detergente en agua para mejorar el resultado de la limpieza, se incrementará el efecto ultrasónico.

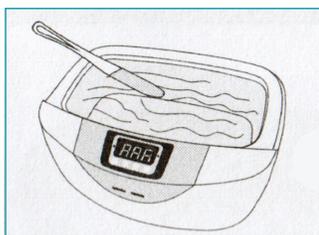

LIMPIEZA POR PIEZAS


Para artículos grandes, limpie parcialmente como se muestra.

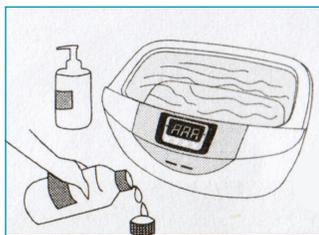

LIMPIEZA EXTENSIVA

Cuando el artículo necesite una limpieza o desinfección exhaustiva, utilice "LIMPIEZA MEJORADA" primero, luego reemplace el agua y agregue aproximadamente 5-10 ml de detergente común, reinicie la limpieza durante aproximadamente 3 minutos.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

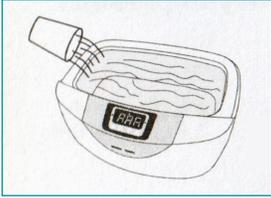


Abra la tapa y llene el tanque de acero inoxidable con agua.

¡El funcionamiento sin agua puede dañar el limpiador!


Coloque el artículo en agua (el agua debe sumergir el artículo que se va a limpiar, pero sin exceder la marca "MAX").

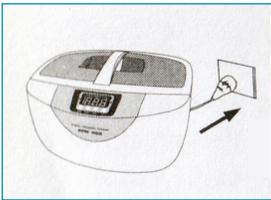


Cierre la tapa y enchufe (la luz indicadora parpadeará).

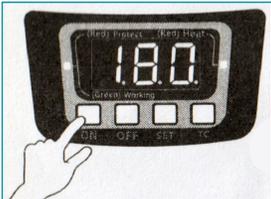


La pantalla digital muestra el tiempo predeterminado 180 segundos después de enchufar. Presione el botón ON, la luz indicadora roja se enciende y la máquina comienza a funcionar. Se detendrá automáticamente después de 180 segundos con la luz roja apagada. Luego, la pantalla se recupera al tiempo predeterminado y se apaga automáticamente sin operación después de 3 minutos.

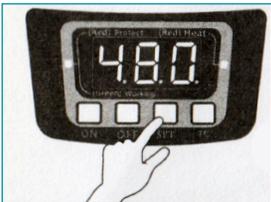

Presione el botón "SET", se pueden elegir 5 tiempos de configuración: 180 s, 280 s, 380 s, 480 s, 90 s. Elige el tiempo según las necesidades.

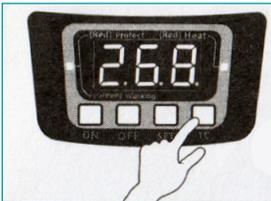

Presione "TC" si se necesita calentar durante la limpieza (se encenderá la luz roja a la derecha). Presione "OFF" para pausar el trabajo.

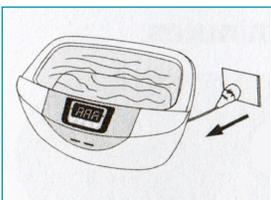


Desconecte inmediatamente cuando termine la limpieza. Luego saque el artículo y vierta el agua del tanque de acero inoxidable y límpielo.


Durante la limpieza, puede escuchar el ruido "ZIZI", significa que el limpiador ultrasónico está funcionando.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


ADVERTENCIA PARA: Reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales.

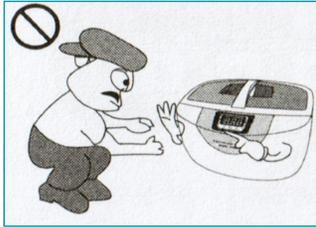


No desmonte el limpiador excepto por el técnico de servicio autorizado.

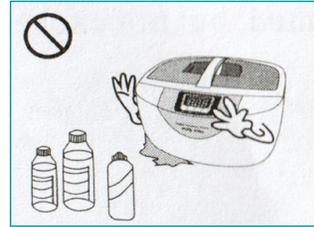


No llene el tanque con productos químicos abrasivos o corrosivos.

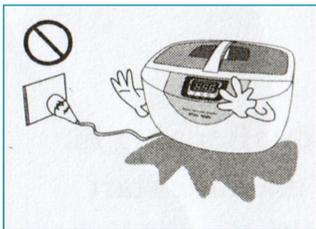


Desenchufe el limpiador antes de llenarlo. No supere la marca MAX.

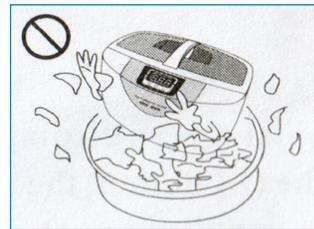


No sumerja el limpiador en agua para reducir el riesgo de electrocución.

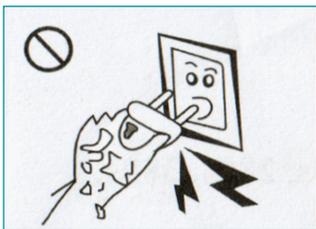


No toque el enchufe con las manos mojadas para reducir el riesgo de electrocución.

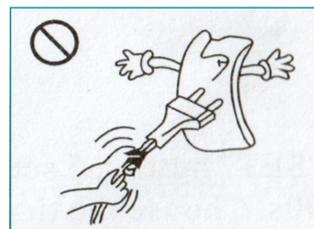

No utilice este limpiador cuando duerme o está somnoliento.

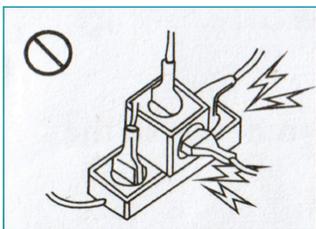

Utilice este limpiador correctamente según el manual de instrucciones. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

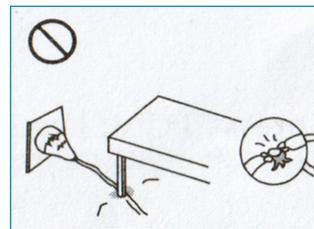


Nunca opere este limpiador si el cable o el enchufe están dañados. Si no funciona correctamente, dañado por el agua, devuelva el limpiador dañado a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.

La máquina debe detenerse 5 minutos después de continuar trabajando durante 30 minutos.


Cualquier artículo con incrustaciones que no esté firme puede convertirse en artículos sueltos que se decoloren fácilmente y no se recomiendan para la limpieza ultrasónica. Por ejemplo: textiles, productos de cuero, artículos de madera, etc.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


PELIGRO PARA: Reducir el riesgo de electrocución.

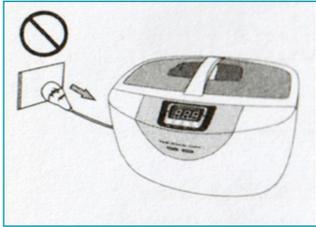


Desenchufe este limpiador inmediatamente después de usarlo.

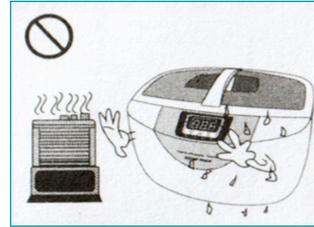


Mantenga el limpiador alejado del calor y colóquelo en una superficie seca y nivelada.

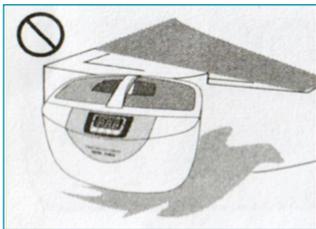


Mantenga el limpiador en un lugar seguro para evitar que caiga al agua u otro líquido.

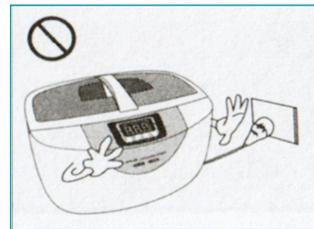

El limpiador nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.

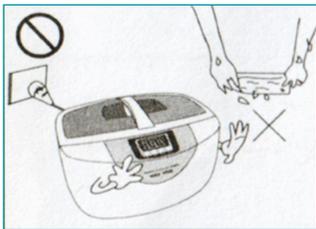

No lo use mientras se baña.

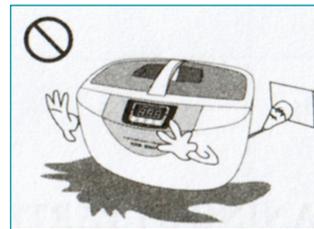

No sumerja el limpiador en agua u otro líquido.




No alcance el limpiador que ha caído al agua. Desenchufe inmediatamente.


No coloque teléfonos móviles o relojes que no sean impermeables en el tanque para limpiarlos.

No coloque ninguna montura de anteojos o artículos de arte que estén hechos de conchas o carey en el tanque para limpiarlos.


MANTENIMIENTO DEL USUARIO

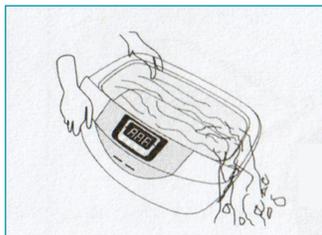

Desenchufe y vacíe el limpiador después de usarlo.
No mantenga el agua en el tanque durante mucho tiempo.

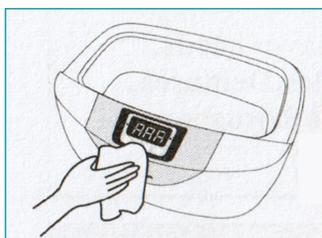

Limpié el tanque y la carcasa con una toalla seca.
No lave el limpiador con agua para evitar descargas eléctricas.

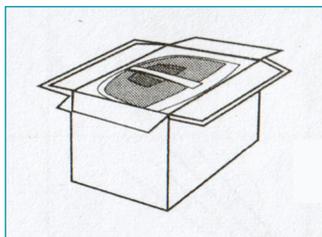

Mantenga el limpiador en un lugar fresco y seco.

USO DE ACCESORIOS OPCIONALES

CANASTA DE PLÁSTICO

Cuando se vaya a limpiar un artículo pequeño, colóquelo en la canasta de plástico y luego coloque la canasta en el tanque. De esta forma, se reducen las fricciones entre la prenda y el objeto.

Preste atención:

La canasta de plástico es solo para limpiar artículos pequeños, ya que absorbe alrededor del 30% de la energía ultrasónica y reduce el resultado de la limpieza en este caso, cuando use la canasta de plástico, consulte las instrucciones de LIMPIEZA MEJORADA en este manual.

Roentgen®