
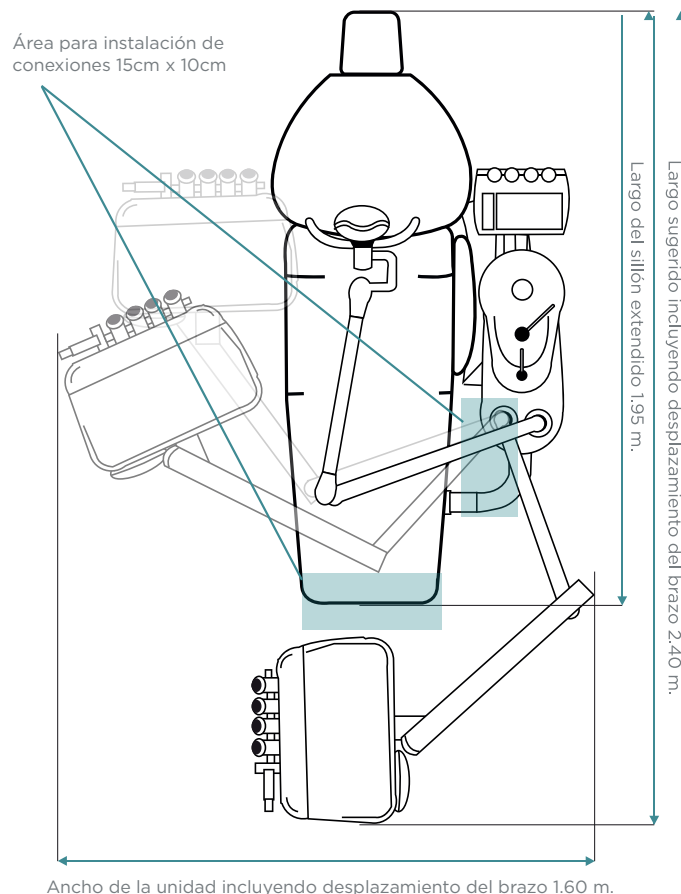


Preinstalación

Peymar

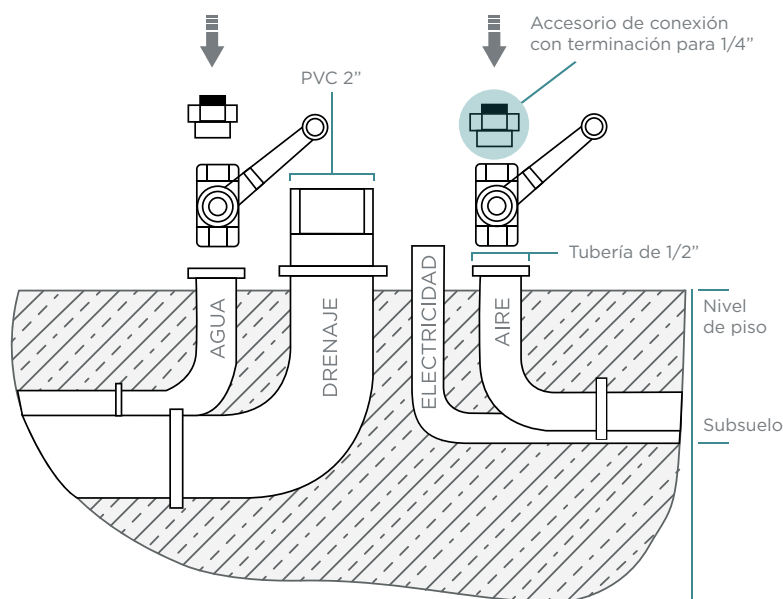

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PISO
Aire	Tubo de cobre de 1/2" con terminación 1/4", se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Agua	Tubo de cobre de 1/2" con terminación 1/4", se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Drenaje	Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%.	5 cm
Contacto Eléctrico	Contacto con tierra física / alimentación 127 V.	10 cm
Compresor	Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.	
NOTA	Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto pierde la garantía.	

¿Requieres de Soporte Técnico?

Contáctanos a los siguientes datos, y con gusto te atenderemos.

- › Tel: (222) 284 08 43
- › Fax: (222) 762 91 69
- › Cuahutémoc Sur No. 1341 Tlaxcalcingo, Puebla.



www.tudepositodental.com



deposito.dental.roentgen



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800