

# Unidad Dental

Peymar Luxor CF 2022



ÚNICA MARCA MEXICANA  
CERTIFICADA EN ISO 9001



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lámpara de led con sensor e interruptor\*\*
- ✓ Cabezal articulado de metal.
- ✓ Tapicería ergonómica, colchón en espuma de poliuretano
- ✓ Brazo derecho abatible\*\*
- ✓ Motores silenciosos apoyados con pistón neumático.
- ✓ Controles de mando para movimientos del sillón en bandeja de instrumentos y pedal al piso.
- ✓ Base en placa con ajustadores para mayor estabilidad.
- ✓ Cubiertas de fibra de vidrio.
- ✓ Pintura de poliuretano alto brillo resistente a químicos y corrosión (No cambia de color, 100% blanco).
- ✓ Escupidera de cerámica desmontable.
- ✓ Entrada para piezas de alta / baja velocidad y jeringa triple; conexión rápida de agua para cavitrón\*\*
- ✓ Sistema de agua médica con indicador de presión para botella\*\*
- ✓ Manguera de poliuretano con forro de silicón\*\*
- ✓ Bandeja de instrumentos para asistente: brazo de suspensión con ajuste de altura, eyectores y jeringa triple.\*\*
- ✓ Banquillo neumático con respaldo ajustable
- ✓ Bandeja de instrumentos amplia con brazo de suspensión para ajuste de altura\*\*
- ✓ Eyectores Ventury y quirúrgico automáticos, con recolector de residuos\*\*

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**





### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



# Preinstalación

Peymar

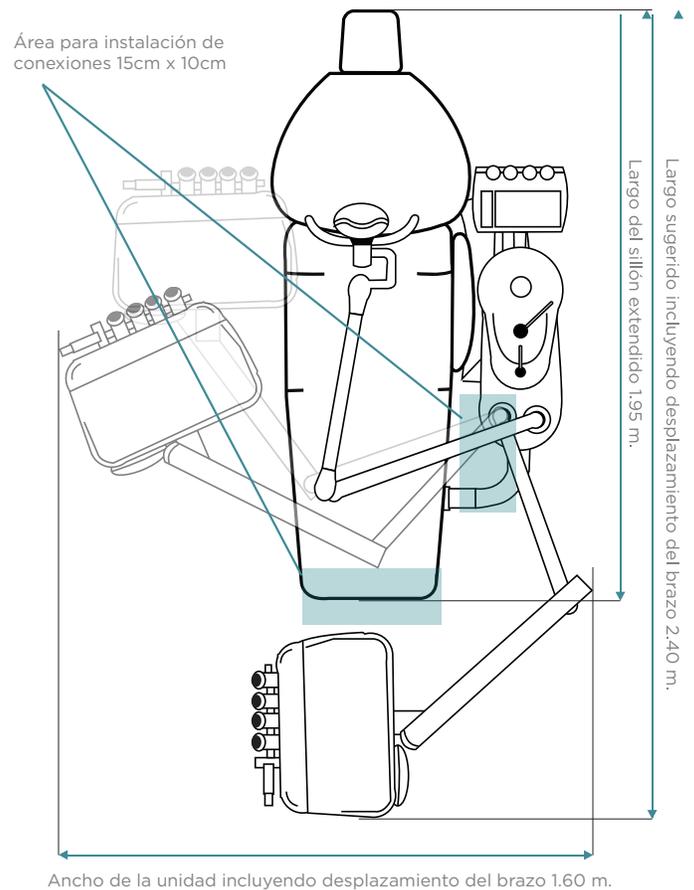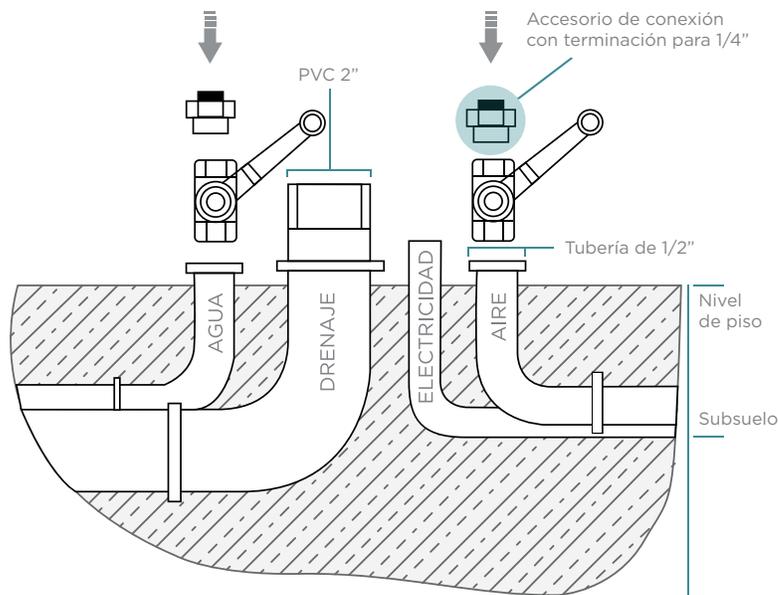

NOMBRE	ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PISO
Aire	Tubo de cobre de 1/2" con terminación 1/4", se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Agua	Tubo de cobre de 1/2" con terminación 1/4", se sugiere instalar llave de paso.	5 cm
Drenaje	Tubo de PVC 2" con declive mínimo de 2%.	5 cm
Contacto Eléctrico	Contacto monofásico polarizado de uso rudo / alimentación 127 V.	10 cm
Compresor	Libre de aceite de 1 HP mínimo, tanque de 37 lt o mayor, desplazamiento mayor a 87 lt/min, calibrado de 80-120 PSI. Si el compresor se encuentra a más de 5 metros es necesario utilizar tubo de 1/2" y a más de 10 metros tubo de 3/4" <b>Si no se purga el compresor después de la jornada laboral pierde garantía.</b>	
NOTA	Si la preinstalación no se encuentra conforme a lo estipulado anteriormente no se garantiza el óptimo funcionamiento de la unidad dental y por lo tanto <b>pierde la garantía.</b>	

## ¿Requieres de Soporte Técnico?

Contáctanos a los siguientes datos, y con gusto te atenderemos.

- ▷ Tel: 01 (222) 284 08 43
- ▷ Fax: 01 (222) 762 91 69
- ▷ Cuahutémoc Sur No. 1341 Tlaxcalcingo, Puebla.

