

Cámara Intraoral

Roentgen RTG-WIFI

Roentgen®



MANUAL DE USO

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



 www.tudepositodental.com

 [deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)

 ventas@tudepositodental.com

 55 3269 8800

CONTENIDO

Roentgen RTG-VGA

Roentgen®

Contenido de la caja	3
Instalación VGA con Monitor	4
Instalación WIFI PC/Laptop	5
Uso de Cámara Intraoral (Botones)	7
Soporte Técnico	8

Contenido de la Caja

Roentgen RTG-VGA

Roentgen®



Centro de
Funcionamiento



Cámara Intraoral



Control
Remoto



Soporte de Cámara
Intraoral



Receptor de Control
Remoto



Antena Wifi



Tornillos para
Soporte



Fundas Desechables
para Cámara Intraoral



Software USB
para Windows



Cable Cámara
Intraoral



Adaptador de
Corriente



Cable VGA

3



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

Instalación VGA

Roentgen RTG-VGA

Roentgen®

1 Conectar Cámara Intraoral

Instale la Cámara Intraoral como se muestra en el diagrama, conecte a cualquier monitor o pantalla con entrada VGA.

Asegurese de conectar la memoria USB al centro de funcionamiento, ya que donde se almacenarán las fotografías tomadas en modo VGA.

2 Encender Equipo

Encienda el interruptor blanco que se encuentra en el centro de funcionamiento, la pantalla mostrara un mensaje de bienvenida y el equipo estará listo para usarse.



4

Instalación WIFI

Roentgen RTG-VGA

Roentgen®

3 Enlazar Cámara Intraoral y computadora


Seleccione la Cámara Intraoral de la lista de dispositivos detectados en su señal WIFI, el nombre y contraseña del dispositivo se encuentran debajo del centro de funcionamiento en una etiqueta color plata (WIFI NAME / PASSWORD)



4 Abra el Software instalado previamente

Una vez abierto el software le solicitará que ingrese los datos del paciente, cuando haya llenado los campos de clic en "Add".

De doble clic en el nombre del paciente para abrir su ficha de clic en el menú "Capture" y comience a tomar fotografías con los botones de la Cámara Intraoral.

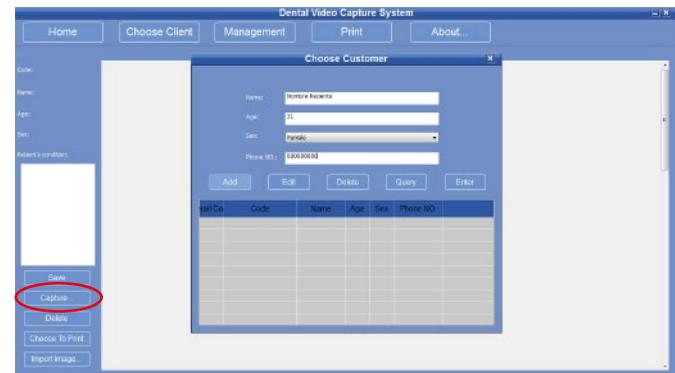

6

Uso de Cámara Intraoral

Roentgen RTG-VGA

Roentgen®



- 1** **Captura de Fotografía**
Presione 1 vez para Capturar, presione en repetidas ocasiones hasta completar las 4 fotografías. Presione nuevamente para guardar, el nombre del archivo aparecerá en la parte superior izquierda de la pantalla, esto indica que la imagen fue guardada en la memoria USB.
- 2** **Modo Quad**
Presione para activar o desactivar modo cuatro fotos.
- 3** **Historial de fotos / Navegación hacia arriba**
Presione para ver las fotos guardadas en la memoria USB, presione nuevamente para pasar a siguiente fotografía.
- 4** **Navegación hacia abajo**
Presione para navegar hacia abajo en el historial fotográfico.
- 5** **Borrar fotografías**
Presione para borrar foto seleccionada, presione nuevamente para confirmar

7



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800

