


Selladora Runyes

De Bolsas Para Esterilizar

Runyes[®]
FOCUS ON DENTAL

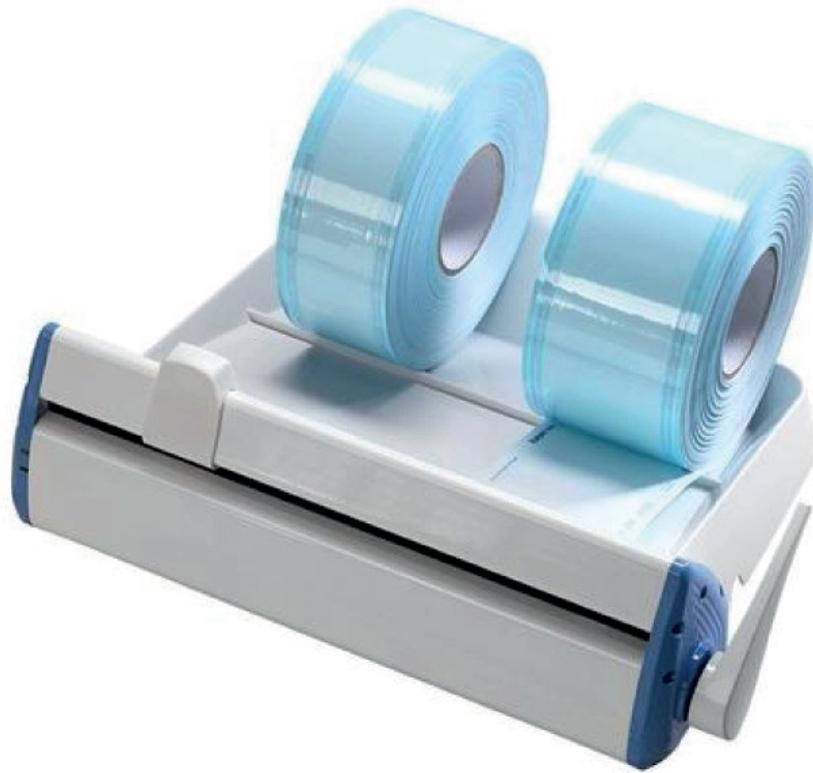

MODO DE OPERACIÓN

- ✓ Cuando la luz verde deja de parpadear, prepárate para trabajar.
- ✓ El mango puede funcionar en 2 direcciones.
- ✓ Mantenga presionado el mango 3> segundos - de sellado completado.
- ✓ Mantenga presionado el mango 6> segundos - se pondrá la alarma.
- ✓ Mantenga presionado el mango 30> segundos - Protección de apagado automático.

Calefacción

Solo 3 minutos de calentamiento para alcanzar 200 +/- 10 ° C.
Mantener la temperatura constante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros	Descripción
Voltaje	AC 110V, 50 - 60Hz
Poder	100 W
Ancho	12mm
Ancho máximo de sellado	300mm
Velocidad de sellado	7.5 metros por minuto
Temperatura de sellado	200 °C +/- 10 °C
Tamaño	545 x 440 x 240 mm
Peso	4.8 kg / 7kg

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995**, **5737-0075** y **5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800