

Conformador de Acetatos

Vacuum Roentgen

Roentgen®



Garantía de 1 año

CARACTERÍSTICAS

Presentamos el **Vacuum Dental Roentgen**, el conformador de acetatos para profesionales de la odontología

- ✓ Conexión a una fuente de alimentación de 110V / 50Hz.
- ✓ Motor de vacío y dispositivo de calentamiento eléctrico de alto rendimiento.
- ✓ Marco ajustable y seguro para trabajar con comodidad y precisión.
- ✓ Proceso de conformado rápido en tan solo 2-3 minutos.
- ✓ Diseño compacto y fácil de usar para odontólogos y dentistas.

¿COMO FUNCIONA?

- ✓ Conecta la máquina y verifica el estado del motor de vacío y el dispositivo de calentamiento.
- ✓ Gira la cubierta superior, coloca la película entre los marcos y ajústalos firmemente.
- ✓ Eleva el marco a la posición de trabajo y coloca el producto en el centro de la lámina.
- ✓ Calienta la película y apaga el dispositivo de calentamiento cuando esté lista.
- ✓ Baja el marco, enciende el motor de vacío y retira el producto después de darle forma.

Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,
CP 07580 CDMX México
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



www.tudepositodental.com



[deposito.dental.roentgen](https://www.facebook.com/deposito.dental.roentgen)



ventas@tudepositodental.com



55 3269 8800